


Science **made** smarter

MT10

Тимпанометрія
стає портативною

Швидкий і простий
в експлуатації
автоматичний
тимпанометр MT10
забезпечує об'єктивні
результати, які
неможливо отримати
лише шляхом
отоскопії

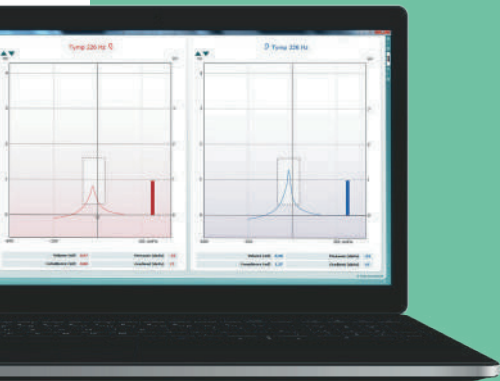


Interacoustics

Audiometry

Tympanometry
~~~~~


ABR

OAE

Hearing Aid Fitting

Balance

# Простий скринінг з MT10

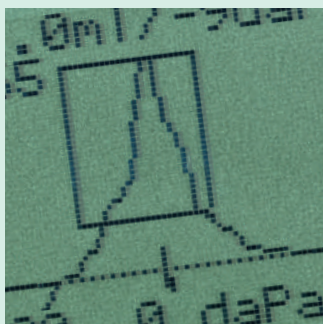

Здорове середнє вуха матиме тимпанограму, яка легко розпізнається за формою. Пік буде знаходитись у полі критерію пройшов / не пройшов



Тест акустичного рефлексу (додатково) може проводитися для підтвердження діагнозу. Легко визначається результат пройшов / не пройшов

В умовах сучасних клінік швидке і точне обстеження має величезне значення. MT10 задовільняє ці вимоги простим та економічно ефективним способом.

## Проста і швидка тимпанометрія

Для отримання результатів не потрібно зайвих зусиль та суб'єктивних відгуків пацієнта. Це особливо корисно при обстеженні маленьких дітей та пацієнтів з особливими потребами. Наприклад, MT10 дозволяє швидко виявити середній отит – головну причину тимчасових або незворотних порушень слуху в дітей.

## Професійне використання

MT10 добре підходить для діагностичного використання, оскільки тимпанометрія та додаткова рефлексометрія виконуються з великою точністю. За допомогою MT10 Ви можете виявляти середній отит, перфорацію барабанної перетинки, холестеатоми та деякі неврологічні розлади. Ви також можете перевірити тимпаностомічні трубки та ефективність лікування.

## Портативність

- Мала вага
- Ручний пристрій
- Завантаження даних для друку
- Додатково можна придбати сумку для транспортування, термопринтер та інфрачервоний USB-адаптер для інтеграції з ПК.


## Іпсилатеральні акустичні рефлекси

Можна виконати до чотирьох різних тестів рефлексометрії на кожному вусі, застосовуючи фіксований або автоматичний вибір інтенсивності.




MT10 дозволяє  
просто і швидко  
виявити  
середній отит


Сумка для  
транспортування  
(можна придбати  
додатково)

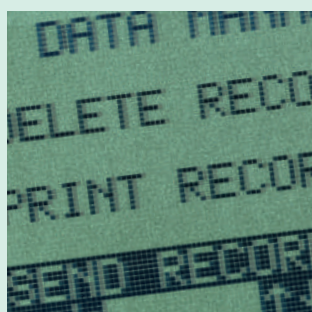

Легко видаляти, друкувати та відправляти результати на ПК (для передачі або друку даних потрібен додатковий інфрачервоний USB-адаптер)

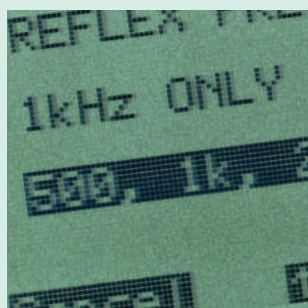

MT10 виконує рефлексометрію на 4 частотах

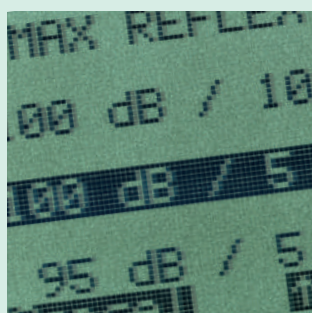

Додатково, рефлексометрія виконується на 4 рівнях (85-100 дБ)

Обстеження проводиться на правильному рівні тиску, фактичні результати відображаються на екрані, де оператор їх може переглянути та інтерпретувати.

- 4 частоти (500, 1000, 2000, 4000 Гц)
- Пошук порогів на одному або декількох рівнях в дБ
- Автоматичне виявлення порогів

### 30 пацієнтів у пам'яті приладу

MT10 може зберігати в пам'яті результати обстеження до 30 пацієнтів. Це дозволяє виконувати скринінг великої групи пацієнтів, а друк отриманих даних відкласти на пізніший час.

### Інтеграція з ПК

Для передачі тимпанометричних даних на ПК, MT10 може використати програмне забезпечення Diagnostic Suite для Windows®.


Програма Diagnostic suite має наступні функції:

- Передача тимпанометричних даних
- Майстер друку (інструмент для створення шаблонів друку)
- Створення персоналізованих та комбінованих звітів
- Створення сторінки розширеного звіту
- Управління даними пацієнтів та сесій
- Повна інтеграція з базами даних: сумісний з OtoAccess™ та Noah

### Головні особливості MT10

- від -400 до +200 даПа
- Іпсилатеральна рефлексометрія (опція)
- 30 пацієнтів у пам'яті
- Швидкість та надійність

MT10 дозволяє просто і швидко виявити середній отит

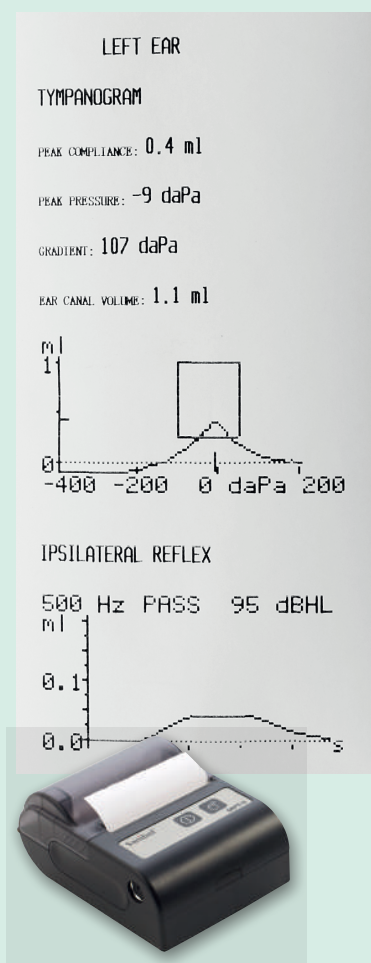

Приклад друкованих на термопринтері (замовляється додатково) результатів обстеження

# Science made smarter

## Interacoustics – більше, ніж високотехнологічні рішення

Наша місія є чіткою і зрозумілою. Ми хочемо бути світовим лідером у аудіології та вестибулометрії, перетворюючи складність у простоту:

- Прості рішення для складних випадків
- Теоретичні знання для практики
- Невидимі медичні аспекти стають явними та виліковними

Наші передові технології та високотехнологічні рішення полегшують роботу фахівців слухової допомоги.

Ми продовжимо встановлювати стандарти в цілій індустрії. Не заради самої науки, а заради того, щоб надати фахівцям змогу якісно допомагати мільйонам пацієнтів по всьому світі.

Інтеракустикс А/С  
Аудіометер Аллє 1  
5500 Міддelfарт  
Данія

+45 6371 3555  
info@interacoustics.com

interacoustics.com

## Ексклюзивний дистриб'ютор та Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Центр слухової реабілітації «АВРОРА»

м. Київ, вул. Деміївська, буд. 43, 03040, Україна  
+380 (44) 501 03 51  
aurora@aurora.ua  
audiometers.aurora.ua

Щоб побачити всю  
лінійку виробів,  
відвідайте наш сайт  
[audiometers.aurora.ua](http://audiometers.aurora.ua)

## Споріднені вироби



AT235

Аналізатор середнього вуха



AD226

Діагностичний аудіометр



Viot™

Відеотоскоп

Всі технічні вимоги та специфікації для всіх виробів можна завантажити на сайтах:  
[www.interacoustics.com](http://www.interacoustics.com) та [www.audiometers.aurora.ua](http://www.audiometers.aurora.ua)

  
**Interacoustics**