



**“ПОГОДЖЕНО”**

Директор ДП «Український  
медичний центр сертифікації»  
Лебідев М.С.  
від 31.01.2017 р.

Технічна документація перевірена  
Державним підприємством «Український  
медичний центр сертифікації»:  
Сертифікат перевірки технічної документації  
№ UA.TR.039.224-17  
від 31.01.2017 р.



|            |     |
|------------|-----|
| ДВ         | 056 |
| 31.01.2017 |     |

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**«ЖЕЛАТИН 10 % - 1 x 10 мл»**  
**ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ ЖЕЛАТИНУ, ЯК ДОПОМІЖНОГО РЕАГЕНТУ**  
**ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУС-ФАКТОРА МЕТОДОМ КОНГЛЮТИНАЦІЇ**

IVD

REF

ПК 74.2-06

**Призначення**

Розчин желатину використовують в якості допоміжного реагенту для визначення резус-фактору методом конглютинації та для визначення сумісності за резус-фактором.

**Комплектність**

| Номер за каталогом | Скорочена назва                   | Склад набору                           |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| ПК 74.1-06         | «Желатин 10 % - 10 x 10 мл»       | Розчин желатину 10 %: 10 x 10 мл       |
| <b>ПК 74.2-06</b>  | <b>«Желатин 10 % - 1 x 10 мл»</b> | <b>Розчин желатину 10 %: 1 x 10 мл</b> |
| ПК 74.3-06         | «Желатин 10 % - 10 x 5 мл»        | Розчин желатину 10 %: 10 x 5 мл        |
| ПК 74.4-06         | «Желатин 10 % - 1 x 5 мл»         | Розчин желатину 10 %: 1 x 5 мл         |

**Термін придатності та умови зберігання нерозпакованого набору**

Гарантійний термін придатності набору - 12 місяців з моменту виготовлення при зберіганні при температурі 2-8 ° С. Під час транспортування допускається нетривале (до 3 діб) зберігання набору при температурі 8-25 ° С. **Не заморозувати!**

**Склад набору**

- 1 Розчин желатину 10 % - 1 ампула з (10,0 ± 0,2) мл

**Приготування, застосування і збереження реагентів**

- 1 Ампулу з розчином желатину перед застосуванням необхідно підігріти на водяній бані з температурою 37-45 ° С до розрідження вмісту. Відбирати розчин желатину слід чистим, бажано стерильним інструментом.
- 2 Використовувати розчин желатину згідно з уніфікованими методиками визначення резус-фактора методом конглютинації та сумісності за резус-фактором.
- 3 Відкупорені ампули зберігають герметично закритими при температурі 2-5 ° С в темному місці не більше трьох діб.
- 4 З ознаками мікробіологічного пошкодження (каламутний, що не застигає) розчин желатину не використовувати!

**Застережні заходи**

- 1 Використовують тест-набір тільки для діагностики in vitro.
- 2 При роботі з набором необхідно дотримуватись правил техніки безпеки при роботі із зразками крові, які треба розглядати, як потенційно інфіковані (ВІЛ, віруси гепатиту В, С і т.д.).

**Утилізація відходів**

Утилізація відходів повинна здійснюватися в відповідності з правилами безпеки Вашої установи.  
**Дата останнього перегляду інструкції з використання 19.05.2025 р.**

**З питань контролю якості та придбання реактивів звертатися за адресою:**

 ПрАТ «РЕАГЕНТ», 49019, Україна, м. Дніпро, вул. Ударників, 27  
Моб. телефони: (050) 452-20-76/85; (067) 638-11-37 (050) 481-75-46; (099) 065-32-59 .  
Відділ технічного контролю : (099) 545-72-05, (050) 455-80-78  
Факс (056) 372-35-56; E-mail: reagent@ukr.net; reagenttn@ukr.net

