



“ПОГОДЖЕНО”

Директор ДП «Український
медичний центр сертифікації»
Лебідєв М.С.
від 31.01.2017 р.

Технічна документація перевірена
Державним підприємством «Український
медичний центр сертифікації»:
Сертифікат перевірки технічної документації
№ UA.TR.039.264-17
від 31.01.2017 р.



ДВ	057
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-057:2013

IVD

REF

МБ 06.3-07

Інструкція

із застосування забарвлювача метиленового синього за Леффлером «Забарвлювач за Леффлером-1000»

Призначення

Реагент призначений для метахроматичного виявлення Грам-позитивних мікроорганізмів (іолутинових зерен коринебактерій, нуклеїнових скупчень бактерій). Набір розраховано на проведення 2000 проб при використанні 0,5 мл розчинів на 1 пробу.

Комплектність

Номер за каталогом	Скорочена назва	Склад набору
МБ 06.1-07	«Забарвлювач за Леффлером-100»	Метиленовий синій за Леффлером: 1 x 100 мл
МБ 06.2-07	«Забарвлювач за Леффлером-500»	Метиленовий синій за Леффлером: 1 x 500 мл
МБ 06.3-07	«Забарвлювач за Леффлером-1000»	Метиленовий синій за Леффлером: 1 x 1000 мл

Термін придатності та умови зберігання нерозпакованого набору

Гарантійний термін придатності з дати виготовлення 12 місяців при температурі 15-30 °С.

Склад набору

1 Метиленовий синій за Леффлером

– 1 флакон з (1000 ± 20) мл

Обладнання та додаткові реагенти

1 Фільтрувальний папір. 2 Підставка («рельси»). 3 Секундомір механічний. 4 Мікроскоп біокулярний оптичний. 5 Додаткові реагенти: знежирювач для предметних скелець; фіксатор для мазків; олія імерсійна, до складу набору не входять.

Приготування і збереження реагенту

Забарвлювач Леффлера - готовий для застосування. Після відкупорювання реагент стабільний при зберіганні герметично закритим в темному місці при температурі 15-30 °С.

Процес фарбування

На фіксований мазок накладають шматок фільтрувального паперу і наливають забарвлювач Леффлера на 3-5 хв. Кількість фарби, яка наноситься на препарат повинна бути така, щоб покривала всю поверхню мазка. По закінченні терміну фарбування папір обережно знімають, фарбу зливають, а препарат промивають проточною або дистильованою водою. Мазок висушують і мікроскопують з імерсійною системою.

Застережні заходи

- 1 Використовують тест-набір тільки для діагностики in vitro.
- 2 Забарвлювач Леффлера – подразнююча речовина. При випадковому потраплянні всередину – промити шлунок; при потраплянні в очі – промити проточною водою; при потраплянні на шкіру – вимити теплою водою з миючим засобом. У випадку загрози пошкодження здоров'я має надаватися медична допомога.
- 3 Необхідно дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з біологічним матеріалом, зразки крові розглядати як потенційно інфіковані (ВІЛ, віруси гепатиту В, С).

Утилізація відходів

Утилізація відходів повинна здійснюватися у відповідності з правилами безпеки Вашої установи.

Дата останнього перегляду інструкції з використання 08.09.2020 р.

З питань контролю якості та придбання реактивів звертатися за адресою:

ПрАТ «РЕАГЕНТ», 49019, Україна, м. Дніпро, вул. Ударників, 27.
Моб. телефони: (050)452-20-76/85; (067)638-11-37; (050)481-46-09/09)065-32-59 .
Відділ технічного контролю : (099)545-72-05; (050)495-80-78
Факс (056) 372-35-56; E-mail: reagent@ukr.net; reagent@ukr.net

