



“ПОГОДЖЕНО”

Директор ДП «Український
медичний центр сертифікації»
Лебідєв М.С.
від 31.01.2017 р.

Технічна документація перевірена
Державним підприємством «Український
медичний центр сертифікації»:
Сертифікат перевірки технічної документації
№ UA.TR.039.264-17
від 31.01.2017 р.



ДВ	057
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-057:2013

IVD

REF

МБ 05.6-07

Інструкція до знебарвлювального розчину «Знебарвлювальний розчин-100»

Призначення

Знебарвлювальний розчин застосовують для знебарвлення препаратів під час фарбування за Ціль-Нільсеном.

Термін придатності та умови зберігання

Гарантійний термін придатності з дати виготовлення – 12 місяців при температурі 15-30 °С.

Склад набору

1 Знебарвлювальний розчин - 1 флакон з (100 ± 2) мл

Обладнання та додаткові реагенти

Реагенти для фарбування мікроорганізмів за Ціль-Нільсеном – додаткові реагенти, до складу набору не входять.

Приготування і збереження робочого реагенту

Знебарвлювальний розчин – придатний до застосування. Реагент стабільний при зберіганні в темному місці при температурі 15-30 °С. УВАГА! Реагент містить леткі компоненти, тому слід запобігати контамінації відкритого реагенту у з повітрям довше, ніж 10 сек!

Застережні заходи

Знебарвлювальний розчин – подразнююча речовина. Використовують реагент тільки для діагностики in vitro.

Утилізація відходів

Утилізація відходів повинна здійснюватися у відповідності з правилами безпеки Вашого підприємства.

Дата останнього перегляду інструкції з використання 08.01.2026 р.

З питань контролю якості та придбання реактивів звертатися за адресою:

ПрАТ «РЕАГЕНТ», 49019, Україна, м. Дніпро, вул. Ударників, 27.
Моб. телефони: (050)452-20-76/85; (067)364-11-57; (050)481-75-46; (099)065-32-59 .
Відділ технічного контролю : (099)545-72-05; (050)495-80-78
Факс (056) 372-35-56; E-mail: reagent@ukr.net; reagenttn@ukr.net