



“ПОГОДЖЕНО”

Директор ДП «Український
медичний центр сертифікації»
Лебідев М.С.
від 31.01.2017 р.

Технічна документація перевірена
Державним підприємством «Український
медичний центр сертифікації»:
Сертифікат перевірки технічної документації
№ UA.TR.039.264-17
від 31.01.2017 р.



ДВ	057
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-057:2013

IVD

REF МБ 05.5-07

**Інструкція
до забарвлювача карболового фуксину Ціля
«Карболовий фуксин Ціля-100»**

Призначення

Забарвлювач карболовий фуксин Ціля застосовують для диференціювання мікроорганізмів (Грам-негативних, кислотостійких), які набувають рожево-червоний, червоний або коричневий колір під дією фарбника. Набір розраховано на проведення 200 проб при використанні 0,5 мл розчинів на 1 пробу.

Позиції за каталогом

Номер за каталогом	Скорочена назва	Склад набору
МБ 02.5-07	«Карболовий фуксин Ціля-1000»	Карболовий фуксин Ціля: 1 x 1000 мл
МБ 05.5-07	«Карболовий фуксин Ціля-100»	Карболовий фуксин Ціля: 1 x 100 мл

Термін придатності та умови зберігання

Гарантійний термін придатності з дати виготовлення – 12 місяців при температурі 15-30 °С. Зберігають у пакуванні виробника у сухих критих приміщеннях захищених від вологи та прямого сонячного світла, осторонь від джерел відкритого вогню та тепла.

Склад набору

1 Карболовий фуксин Ціля - 1 флакон з (100 ± 2) мл

Обладнання та додаткові реагенти

1 Мірний циліндр (інший посуд), для приготування розчину Пфайфера.
2 Реагенти для фарбування мікроорганізмів за Грамом, за Ціль-Нільсеном і т.п. – додаткові реагенти, до складу набору не входять.

Приготування і збереження фуксину Пфайфера

Водний розчин фуксину Ціля (фуксин Пфайфера). Змішують 1 частину карболового фуксину Ціля з 9 частинами дистильованої води (співвідношення 1:9). Розчин готують перед проведенням забарвлення. Стабільний до 12 годин при кімнатній температурі.

Застережні заходи

1 Використовують реагент тільки для діагностики in vitro.
2 Карболовий фуксин Ціля – отруйна речовина. При випадковому потрапленні всередину – промити шлунок; при потрапленні в очі – промити проточною водою; при потрапленні на шкіру – вимити теплою водою з миючим засобом. У випадку загрози пошкодження здоров'я має надаватися медична допомога.
3 Необхідно дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з біологічним матеріалом, зразки крові розглядати як потенційно інфіковані (ВІЛ, віруси гепатиту В, С).

Утилізація відходів

Утилізація відходів повинна здійснюватися у відповідності з правилами безпеки Вашого підприємства.

Дата останнього перегляду інструкції з використання 08.01.2026 р.

З питань контролю якості та придбання реактивів звертатися за адресою:

ПрАТ «РЕАГЕНТ», 49019, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27.
Моб. телефони: (050)452-20-76/85; (067)638-11-37; (050)481-75-46; (099)065-32-59 .
Відділ технічного контролю : (099)545-72-05; (050)495-80-78
Факс (056) 372-35-56; E-mail: reagent@ukr.net; reagenttn@ukr.net