



“ПОГОДЖЕНО”

Директор ДП «Український
медичний центр сертифікації»
Лебідев М.С.
від 31.01.2017 р.

Технічна документація перевірена
Державним підприємством «Український
медичний центр сертифікації»:
Сертифікат перевірки технічної документації
№ UA.TR.039.264-17
від 31.01.2017 р.



ДВ	057
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-057:2013

IVD

REF МБ 12.4-07

**Інструкція
до концентрованого буферного розчину
«Концентрований буферний розчин-100»**

Призначення

Концентрований буферний розчин призначений для приготування буферного розчину, як допоміжного реактиву при забарвленні формених елементів крові за Романовським.

Комплектність

Номер за каталогом	Скорочена назва	Склад набору
МБ 12.1-07	«Азур-еозин за Романовським-100»	Азур-еозин за Романовським: 1 x 100 мл; Концентрований буферний розчин: 1 x 10 мл
МБ 12.2-07	«Азур-еозин за Романовським-500»	Азур-еозин за Романовським: 1 x 500 мл; Концентрований буферний розчин: 1 x 50 мл
МБ 12.3-07	«Азур-еозин за Романовським-1000»	Азур-еозин за Романовським: 1 x 1000 мл; Концентрований буферний розчин: 1 x 100 мл
МБ 12.4-07	«Концентрований буферний розчин-100»	Концентрований буферний розчин: 1 x 100 мл
МБ 12.5-07	«Концентрований буферний розчин-1000»	Концентрований буферний розчин: 1 x 1000 мл

Термін придатності та умови зберігання нерозпакованого набору

Гарантійний термін придатності з дати виготовлення 12 місяців при температурі 15-30 °С.

Обладнання та додаткові реагенти

- 1 Колба на 1000 (або 2000) мл;
- 2 Дозатор (піпетка) на 5,0 мл;
- 3 Вода дистильована.

Склад набору

Концентрований буферний розчин

- 1 флакон з (100 ± 2) мл

Приготування і збереження робочого реагенту.

Розведений буферний розчин з рН = 6,9 ± 0,1. Концентрований буферний розчин розводять у 200 разів: відбирають точно 5,0 мл концентрованого буферного розчину у мірну колбу на 1000 мл (або 10 мл у мірну колбу на 2000 мл), доводять дистиллятом до мітки та ретельно перемішують. Зберігають в темряві, герметично закритим, при температурі 2-8 °С протягом 6 місяців. 100 мл концентрованого достатньо для приготування 20 л розведеного буферного розчину.

Застережні заходи

- 1 Використовують тест-набір тільки для діагностики in vitro.
2. Концентрований буферний розчин містить азид – отруйну речовину. При випадковому потраплянні всередину – негайно промити шлунок; при потраплянні в очі – промити проточною водою; при потраплянні на шкіру – промити теплою водою з миючим засобом. У випадку загрози пошкодження здоров'я має надаватися медична допомога.

Утилізація відходів

Утилізація відходів повинна здійснюватися у відповідності з правилами безпеки Вашої установи.

Дата останнього перегляду інструкції з використання 08.01.2026 р.

З питань контролю якості та придбання реактивів звертатися за адресою:

ПрАТ «РЕАГЕНТ», 49019, Україна, м. Дніпро, р-н. Узинників, 27.
Моб. телефони: (050) 452-20-76/85; (067) 638-11-37; (050) 481-75-46; (099) 065-32-59 .
Відділ технічного контролю : (099) 545-72-05; (050) 495-80-78
Факс (056) 372-35-56; E-mail: reagent@ukr.net; reagentth@ukr.net