



“ПОГОДЖЕНО”

Директор ДП «Український
медичний центр сертифікації»
Лебідев М.С.
від 31.01.2017 р.

Технічна документація перевірена
Державним підприємством «Український
медичний центр сертифікації»:
Сертифікат перевірки технічної документації
№ UA.TR.039.264-17
від 31.01.2017 р.



ДВ	057
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-057:2013

IVD

REF МБ 07.1-07

Інструкція до забарвлювача насиченого метиленового синього «Метиленовий синій-100»

Призначення

Забарвлювач призначений для забарвлення мікроорганізмів з метою їх виявлення та ідентифікації. Набір розраховано на проведення 200 проб при використанні 0,5 мл розчинів на 1 пробу.

Комплектність

Номер за каталогом	Скорочена назва	Склад набору
МБ 07.1-07	«Метиленовий синій-100»	Метиленовий синій: 1 x 100 мл
МБ 07.2-07	«Метиленовий синій-500»	Метиленовий синій: 1 x 500 мл
МБ 07.3-07	«Метиленовий синій-1000»	Метиленовий синій: 1 x 1000 мл

Термін придатності та умови зберігання нерозпакованого набору

Гарантійний термін придатності з дати виготовлення 12 місяців при температурі 15-30 °С.

Склад набору

1 Метиленовий синій

– 1 флакон з (100 ± 2) мл

Обладнання та додаткові реагенти

1 Фільтрувальний папір. 2 Підставка для фарбування («рельси»). 3 Секундомір механічний. 4 Мікроскоп бінокулярний оптичний. 5 Додаткові реагенти: знежирювач для предметних скелець, фіксатор для мазків, олія імерсійна – до складу набору не входять.

Приготування і збереження реагенту

Метиленовий синій - готовий для застосування. Після відкупорювання реагенти стабільні при зберіганні герметично закритими в темному місці при температурі 15-30 °С.

Процес фарбування

На фіксований мазок накладають шматок фільтрувального паперу і наливають насичений розчин метиленового синього на 3-5 хв. Кількість фарби, яка наноситься на препарат повинна бути така, щоб покривала всю поверхню мазка. По закінченні терміну фарбування папір обережно знімають, фарбу зливають, а препарат промивають проточною або дистильованою водою. Мазок висушують і мікроскопують з імерсійною системою.

Застережні заходи

1 Використовують тест-набір тільки для діагностики in vitro.

2 Метиленовий синій – подразнююча речовина. При випадковому потраплянні всередину – випити 0,5 л води і промити шлунок; при потраплянні в очі – промити проточною водою; при потраплянні на шкіру – вимити теплою водою з миючим засобом. У випадку загрози пошкодження здоров'я має надаватися медична допомога.

3 Необхідно дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з біологічним матеріалом, зразки крові розглядати як потенційно інфіковані (ВІЛ, віруси гепатиту В, С).

Утилізація відходів

Утилізація відходів повинна здійснюватися у відповідності з правилами безпеки Вашого підприємства.

Дата останнього перегляду інструкції з використання 08.01.2026 р.

З питань контролю якості та придбання реагентів звертатися за адресою:

ПрАТ «РЕАГЕНТ», 49019, Україна, м. Дніпро, вул. Ударників, 27.
Моб. телефони: (050) 452-20-76/85; (067) 638-11-37; (050) 481-75-46; (099) 065-32-59.
Відділ технічного контролю : (099) 545-72-05; (050) 495-80-78
Факс (056) 372-35-56; E-mail: reagent@ukr.net; reagenttr@ukr.net

