



“ПОГОДЖЕНО”

Директор ДП «Український
медичний центр сертифікації»
Лебідєв М.С.
від 31.01.2017 р.

Технічна документація перевірена
Державним підприємством «Український
медичний центр сертифікації»:
Сертифікат перевірки технічної документації
№ UA.TR.039.264-17
від 31.01.2017 р.



ДВ	057
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-057:2013

IVD

REF

МБ 13.2-07

Інструкція із застосування забарвлювача діамантового крезолового синього для ретикулоцитів «Ретикулоцити-50»

Призначення

Набір призначений для забарвлення ретикулоцитів при гематологічних дослідженнях. Розрахований на проведення 1000 аналізів при використанні 0,05 мл забарвлювача на 1 аналіз.

Комплектність

Номер за каталогом	Скорочена назва	Склад набору
МБ 13.1-07	«Ретикулоцити-20»	Діамантовий крезоловий синій: 1 x 20 мл; Олія імерсійна: 1 x 5 мл
МБ 13.2-07	«Ретикулоцити-50»	Діамантовий крезоловий синій: 1 x 50 мл; Олія імерсійна: 1 x 5 мл
МБ 13.3-07	«Ретикулоцити-100»	Діамантовий крезоловий синій: 1 x 100 мл; Олія імерсійна: 1 x 10 мл

Термін придатності та умови зберігання нерозпакованого набору

Гарантійний термін придатності з моменту виготовлення 12 місяців при температурі 15-30 °С.

Склад набору

- 1 Діамантовий крезоловий синій
- 2 Олія імерсійна

- 1 флакон з (50 ± 1) мл
- 1 флакон з (5,0 ± 0,1) мл

Обладнання і реagentи

- 1 Пробірки лабораторні (Відаля).
- 2 Предметні скельця.
- 3 Шліфоване скло.
- 4 Секундомір механічний.
- 5 Мікроскоп бінокулярний оптичний.
- 6 Спирт етиловий 96 %-ний для знежирювання скла.

Приготування і збереження робочого reagentу

Компоненти набору готові до застосування. Розчин стабільний після відкупорювання протягом всього терміну придатності при зберіганні герметично закритим в темному місці при температурі 15-30 °С.

Проведення аналізу

Змішують у пробірках Відаля кров та розчин фарбнику у співвідношенні 1:1 і обережно, але ретельно перемішують (допускається для дозування використання капілярів Панченка). Пробірки закривають, витримують 20-30 хвилин, знов перемішують і готують мазки. Готові мазки висушують у повітрі при кімнатній температурі та мікроскопують з імерсійною системою.

Інтерпретація результатів

Еритроцити та ретикулоцити забарвлюються у зеленувато-блакитний колір, а зернисто-нитчаста субстанція ретикулоцитів – у темно-синій (до фіолетового) колір.

Застережні заходи

- 1 Використовують тест-набір тільки для діагностики in vitro.
- 2 Розчин діамантового крезолового синього – подразнююча речовина. При потрапленні в очі або на слизові оболонки – промити проточною водою; при потрапленні на шкіру – вимити теплою водою з м'яким засобом. У випадках ризику пошкодження здоров'я має надаватися медична допомога.
- 3 Необхідно дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з біологічним матеріалом, зразки крові розглядати як потенційно інфіковані (BII, віруси гепатиту В, С).

Утилізація відходів

Утилізація відходів повинна здійснюватися в відповідності з правилами безпеки Вашої установи.

Дата останнього перегляду інструкції з використання 08.01.2026 р.

З питань контролю якості та придбання reagentів звертатися за адресою:

 ПрАТ «РЕАГЕНТ», 49019, Україна, м. Дніпро, вул. Уларників, 27.
Моб. телефони: (050) 452-20-76/85; (067) 638-11-37; (050) 481-75-46; (099) 065-32-59.
Відділ технічного контролю : (099) 545-72-05; (050) 495-80-78
Факс (056) 372-35-56; E-mail: reagent@ukr.net; reagenttn@ukr.net