



“ПОГОДЖЕНО”

Директор ДП «Український
медичний центр сертифікації»
Лебідев М.С.
від 31.01.2017 р.

Технічна документація перевірена
Державним підприємством «Український
медичний центр сертифікації»:
Сертифікат перевірки технічної документації
№ UA.TR.039.264-17
від 31.01.2017 р.



ДВ	057
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-057:2013

IVD

REF

МБ 03.5-07

Інструкція до розчину Люголя «Розчин Люголя-1000»

Призначення

Розчин Люголя застосовують у мікробіології та гістології для забарвлення мікроорганізмів за методом Грама, гелмінтів та біологічних тканин. Набір розраховано на проведення 2000 проб при використанні 0,5 мл розчинів на 1 пробу.

Термін придатності та умови зберігання

Гарантійний термін придатності з дати виготовлення 12 місяців при зберіганні при температурі 15-30 °С в темному місці.

Склад набору

1 Розчин Люголя

- 1 флакон з (1000 ± 20) мл

Обладнання та додаткові реагенти

Реагенти для фарбування мікроорганізмів за методом Грама – додаткові реагенти, до складу набору не входять.

Приготування і збереження робочого реагенту

Розчин Люголя – готовий до застосування. Реагент стабільний при зберіганні в темному місці при температурі 15-30 °С протягом всього терміну придатності.

Застережні заходи

- 1 Використовують тест-набір тільки для діагностики *in vitro*.
2. Розчин Люголю – подразнююча речовина. При випадковому потраплянні всередину – випити 0,5 л води та промити шлунок; при потраплянні в очі – промити проточною водою; при потраплянні на шкіру – вимити теплою водою з миючим засобом. У випадках серйозного пошкодження здоров'я має надаватися медична допомога.
- 3 Необхідно дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з біологічним матеріалом, зразки розглядати, як потенційно інфіковані (ВІЛ, віруси гепатиту С).

Утилізація відходів

Утилізація відходів повинна здійснюватися у відповідності з правилами безпеки Вашої установи.

Дата останнього перегляду інструкції з використання 08.01.2026 р.

З питань контролю якості та придбання реактивів звертатися за адресою:

■ ПрАТ «РЕАГЕНТ», 49019, Україна, м. Дніпро, вул. Ударників, 27.
Моб. телефони: (050)452-20-76/85; (067)63841157; (050)481-75-46; (099)065-32-59 .
Відділ технічного контролю : (099)545-72-05; (050)495-80-78
Факс (056) 372-35-56; E-mail: reagent@ukr.net; reagenttn@ukr.net