



“ПОГОДЖЕНО”

Директор ДП «Український
медичний центр сертифікації»
Лебідєв М.С.
від 31.01.2017 р.

Технічна документація перевірена
Державним підприємством «Український
медичний центр сертифікації»:
Сертифікат перевірки технічної документації
№ UA.TR.039.264-17
від 31.01.2017 р.



ДВ	057
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-057:2013

IVD

REF МБ 10.4-07

Інструкція із застосування фіксатора еозину метиленового синього за Май-Грюнвальдом «Фіксатор еозин за Май-Грюнвальдом-1000»

Призначення

Набір призначений для використання еозину метиленового синього за Май-Грюнвальдом в якості фіксатора для гематологічних досліджень формених елементів крові. Набір розраховано на проведення 2000 проб при використанні 0,5 мл розчину на 1 пробу.

Термін придатності та умови зберігання нерозпакованого набору

Гарантійний термін придатності з дати виготовлення 12 місяців при температурі 15-30 °С.

Склад набору

- Еозин за Май-Грюнвальдом – 1 флакон з (1000,0 ± 10,0) мл;
- Додатковий реагент для забарвлення – «Азур-еозин за Романовським», до складу набору не входить.

Обладнання

- Предметні (оптично-препаративні) скельця 25 мм x 75 мм.
- Пінцет для тримання предметних скельць.
- Штативи (лотки) для сушки мазків.
- Підставка («рельси») для фіксації та забарвлення мазків.
- Секундомір механічний.

Приготування і збереження робочого реагенту

Еозин за Май-Грюнвальдом готовий до застосування. Після відкупорювання зберігають в темряві, герметично закритим, при температурі 15-30 °С протягом всього терміну придатності.

Проведення визначення

- Матеріал, що досліджується, розподіляють тонким шаром по поверхні добре знежиреного скла і висушують на повітрі до зникнення вологого блиску. При повільному висиханні може змінитися морфологія клітин.
- Скельця кладуть мазками до верху на місток для фіксації і наливають розчин еозину метиленового синього за Май-Грюнвальдом. Час фіксації – 3-5 хв. Розчин зливають і промивають мазок дистильованою водою.
- Для подальшого забарвлення мазків рекомендовано використовувати набір «Азур-еозин за Романовським».

Застережні заходи

- Використовують тест-набір тільки для діагностики in vitro.
- Розчин еозин метиленовий синій за Май-Грюнвальдом – отруйна речовина. При випадковому потрапленні всередину – негайно промити шлунок; при потрапленні в очі – промити проточною водою; при потрапленні на шкіру – вимити теплою водою з миючим засобом. У випадку загрози пошкодження здоров'я має надаватися медична допомога.

Утилізація відходів

Утилізація відходів повинна здійснюватися в відповідності з правилами безпеки Вашої установи.

Літературні посилання

Нормативні директивні правові документи. Клінічна лабораторна діагностика. Київ. 2003. МВЦ Медінформ». Дата останнього перегляду інструкції з використання 08.01.2026 р.

З питань контролю якості та придбання реагентів звертатися за адресою:

ПрАТ «РЕАГЕНТ49019, Україна, м. Дніпро, вул. учасників, 27.
Моб. телефони: (050) 452-20-76/85; (067) 638-11-37; (056) 481-75-46; (099) 065-32-59.
Відділ технічного контролю : (099) 545-72-05; (050) 495-80-78
Факс (056) 372-35-56; E-mail: reagent@ukr.net; reagent@ukr.net

